

CBC Slingcross®

Einwegvenenstauer

Single-use tourniquet

Intern. patents



Made in Germany

1. Hinweise zur Gebrauchsanweisung


2. Notes on the operating instructions

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle CBC Slingcross® Einweg-Venenstauer und baugleiche Derivate. (Artikelnummer: 521003...)

These operating instructions are valid for all CBC Slingcross® single-use tourniquets and products identical in construction. (REF No. 521003...)

2. Aufbau und Bestandteile

2. Layout and components

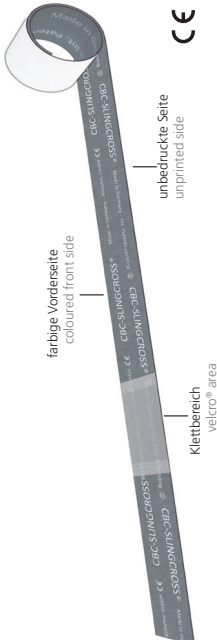

3. Zweckbestimmung

3. Purpose


Medizinisches Hilfsmittel, um Blut in den Venen zu stauen, um dadurch die Vene besser orten und punktieren zu können.

Zur sicheren Anwendung des Produkts wird ausschließlich die Handhabung durch medizinisches Fachpersonal empfohlen. Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Medical device to stop venous blood flow so that it is easier to locate and puncture a vein. To ensure a safe application of the product, we recommend that it should be used by medical staff only. There are no known contraindications.


4. Anwendung und Entsorgung

4. Application and disposal

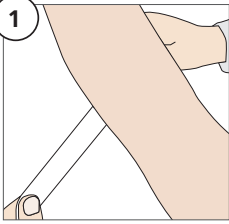


**Unbedruckte Seite zum
Arm des Patienten.**

**Place unprinted side on
the patient's arm.**

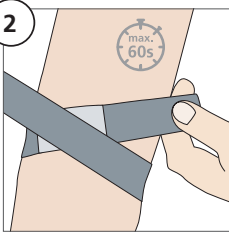

**Straff um den Arm legen
und im Klettbereich
fixieren.**

**Place strap tightly around
the arm and attach in the
velcroed^{®*} area.**

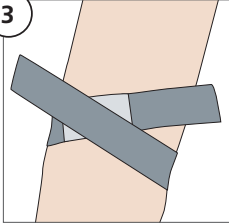

Zum Lösen einfach ziehen.

**Simply pull to release the
strap.**



**Nach Gebrauch nicht
wiederverwenden
und vorschriftsmäßig
entsorgen.**

**Do not reuse after use
and dispose of in accor-
dance with regulations.**

***Velcro[®] is a registered trade-
mark of Velcro Industries B.V.**

CE Konformitätszeichen nach
EU Richtlinie 93/42/EWG
Conformity mark according to
EU Council Directive 93/42/EEC



Kimetec GmbH

Gerlinger Straße 36-38

71254 Ditzingen

Germany

www.kimetec.de