

Der bunte Einweg-Venenstauer für Kinder

Optimale Staukraft (ca. 20 mmHg)

- Durch Auseinanderziehen des Elastik-Bandes erreicht man zuverlässig die optimale Staukraft
- Definierte Staukraft – unterstützt den Anwender
- Fehlpunktionen (z.B. Ruptur) können verringert werden

Keine aufwändige Reinigung & Desinfektion

- Einwegprodukt – keine Reinigung oder Desinfektion erforderlich
- Keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen

Komfort für das medizinische Fachpersonal

- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Mikroklett für einfaches Schließen und Öffnen
- Besonders geringes Gewicht (ca. 2,5 g/Stück)

Komfort für den Patienten


- Weiches Vlies – kein Quetschen, Einschnüren oder Klemmen der Haut
- Frei von Latex, Silikon und Weichmachern

Individuell und farbenfroh

- Ab 20.000 Stück – Kundenspezifische Farben und Designs


Einsatzgebiete

- Isolationspatienten
- Hausbesuche
- Pädiatrie
- Onkologie

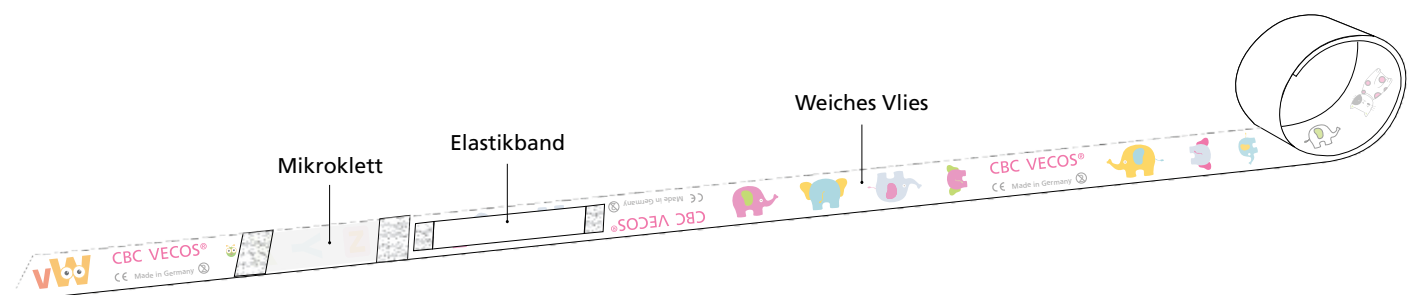


Der bunte Einweg-Venenstauer für Kinder

Anwendung

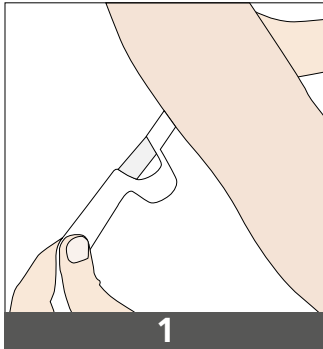

1
Unbedruckte Seite zum Arm des Patienten

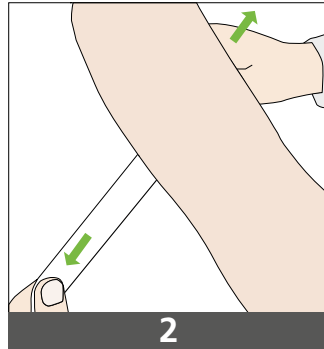

2
Zum Aufbau der Staukraft vollständig auseinanderziehen.



3
Straff um den Arm legen und im Klettbereich fixieren.



4
Zum Lösen einfach ziehen.

Nach Gebrauch nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern und vorschriftsmäßig entsorgen.

Video-Link



Bestelldaten



Medizinprodukt

Produktbeschreibung:	CBC VECOS® KIDS
Band	3 cm breit, 50 cm lang
REF 521003 013	125 Stück in Spenderbox
REF 521003 015	1 Nachfüllbeutel à 125 Stück
REF 521003 014	8 Boxen à 125 Stück in Spenderbox
REF 521003 016	8 x 1 Nachfüllbeutel à 125 Stück

Sparen Sie Kosten mit dem CBC VECOS® KIDS:

- Keine Wiederaufbereitung, Reinigung oder Desinfektion.
- Frei von Latex, Silikon und DEHP (Weichmacher).