


## ANWENDUNG


### APPLICATION

Prüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf äußerliche Beschädigungen und Funktionsfähigkeit. Bei Defekten oder Fehlfunktionen darf das Produkt nicht weiter verwendet werden. Prior to using the product, always check it for external damage and proper working. Do not use the product in case of faults or faulty functions.

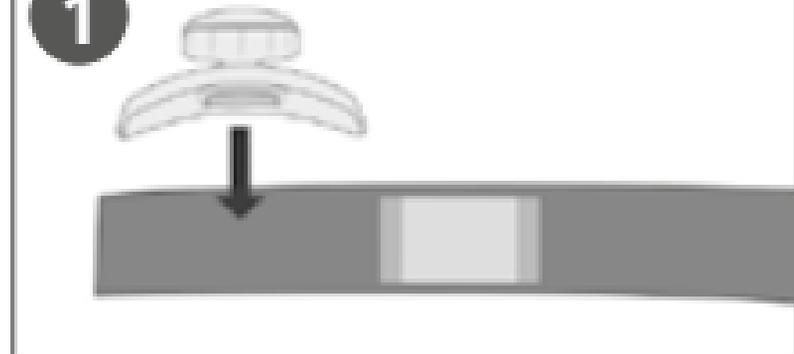


Twist auf Band setzen

Put twist on strap end

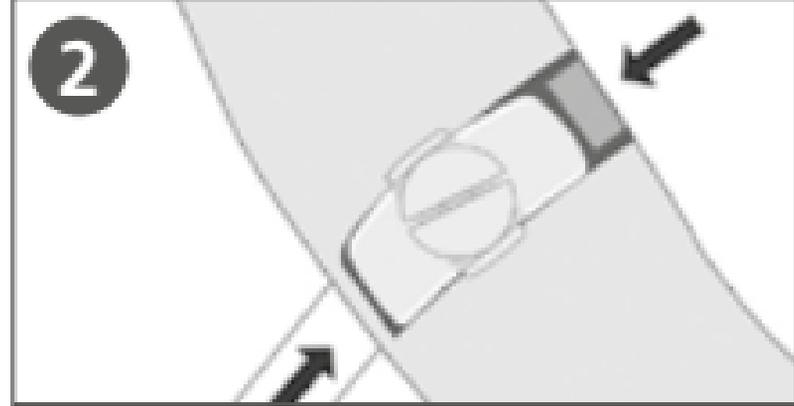


Am Arm anlegen

Place on the arm

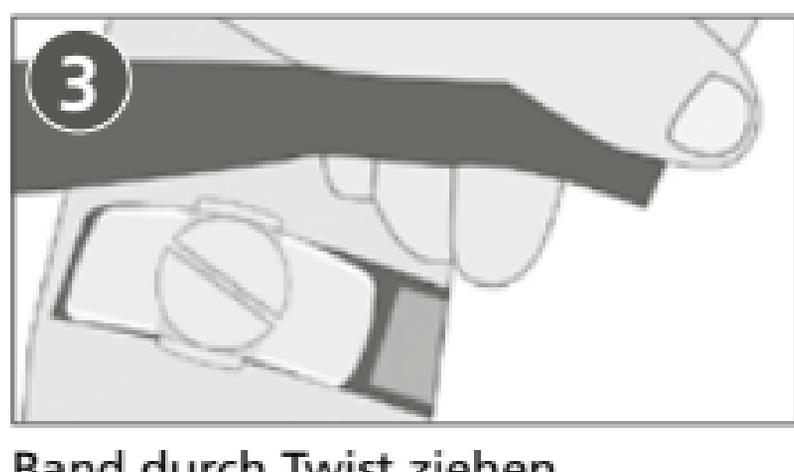


Band durch Twist ziehen

Pull strap through twist

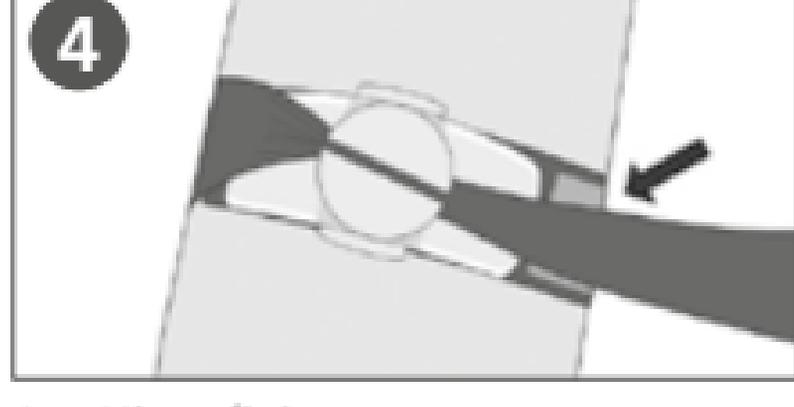


Am Klett fixieren

Fix at velcro area

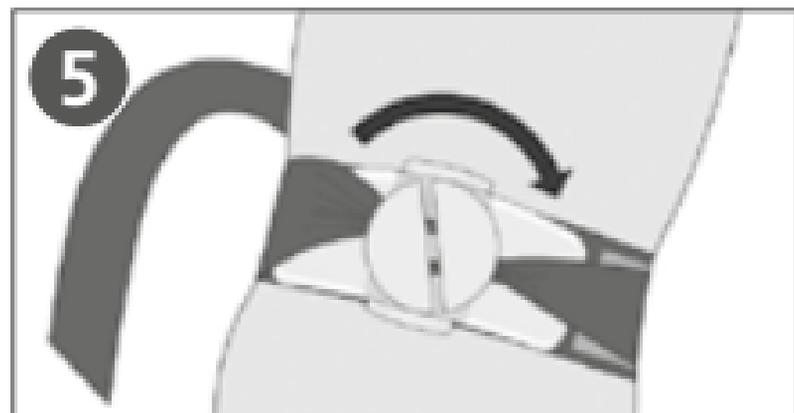

Drehen & Stauen

Turn to compress

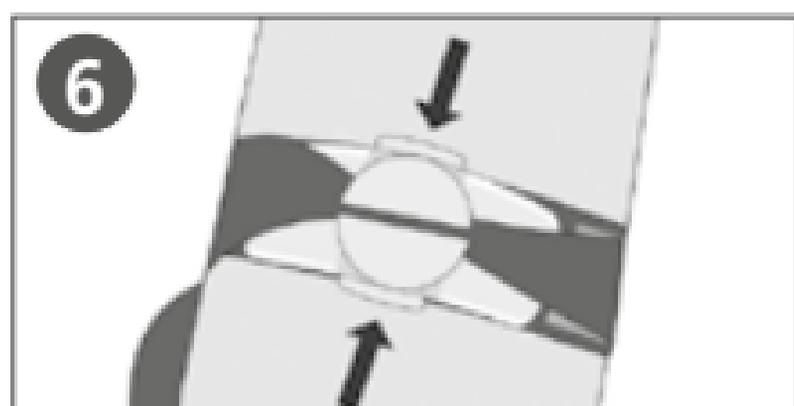

Zum Lösen drücken

Push to release

## DESINFEKTION

### DISINFECTION

Desinfektion mit aldehydfreiem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (mind. 45 Gew.-% bzw. 53 Vol.-% Ethanol; z.B. DESCOSEPT PUR). CBC Twist in einem Gefäß (kein Metall) vollständig mit Lösung bedecken, 10 Sek. schütteln, dann 5 Min. bei 20-24 °C einwirken lassen. Anschließend vollständig trocknen lassen.

[kimetec.de/de/downloads.html](http://kimetec.de/de/downloads.html)

Disinfect with aldehyde-free alcohol-based disinfectant (min. 45 % by weight or 53 % by volume ethanol; e.g. DESCOSEPT PUR). Place CBC Twist in a container (no metal) and cover completely with solution, shake for 10 sec., then leave for 5 min. at 20 - 24 °C. Afterwards allow to dry completely.

[kimetec.com/en/downloads.html](http://kimetec.com/en/downloads.html)



**Kimetec GmbH**

Gerlinger Str. 36-38

71254 Ditzingen

Germany

**GB2010008M**

Stand / As of 2020-03

# CBC Sling & Twist

## Einhand-Venenstauersystem

## One-hand tourniquet system

Made in Germany

Intern. pat. pend.



### ZWECKBESTIMMUNG

#### PURPOSE

Medizinisches Hilfsmittel, um Blut in den Venen zu stauen, um dadurch die Vene besser orten und punktieren zu können.

Medical device to occlude venous blood flow for an easier location and puncture of a vein.

### KONTRAINDIKATIONEN/

#### NEBENWIRKUNGEN

#### CONTRAINDICATIONS/

#### SIDE EFFECTS

Keine bekannt

None

### PATIENTENZIELGRUPPE

#### TARGET GROUP OF PATIENTS


Keine Einschränkungen

No restrictions

### ANWENDER

#### USERS

Die Anwendung darf nur durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.  
Only appropriately trained and qualified staff may apply the product.

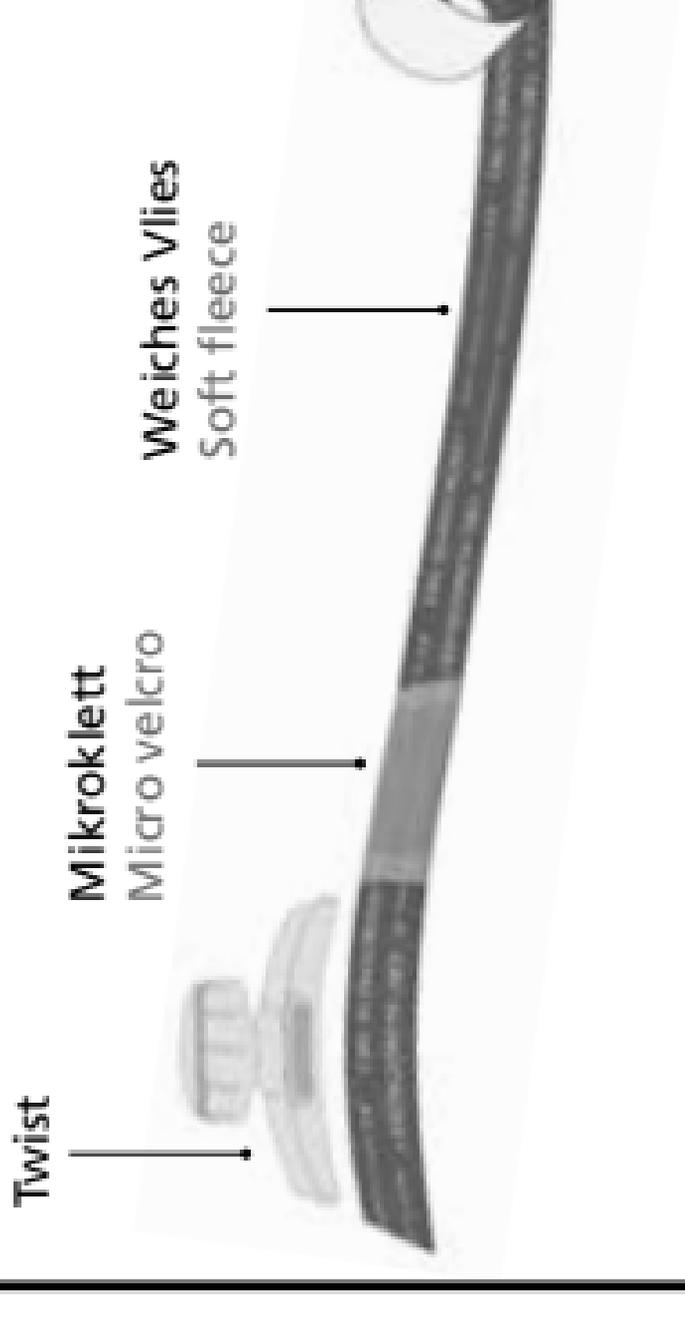


Nicht zu einem anderen als dem vorgegebenen Zweck verwenden!  
Strangulierungsgefahr!  
Do not use this device for purposes other than those indicated in this instruction!  
Strangulation hazard!



Gebrauchsanweisung beachten.  
Observe operation instructions.



Medizinprodukt  
Medical device

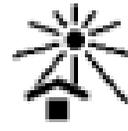

Von Sonnenlicht fernhalten.  
Keep away from sunlight.



Trocken aufbewahren.  
Keep dry.



Band nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden und vorschriftsmäßig entsorgen.  
Do not reuse strap after use, to avoid cross-contamination and dispose of in accordance with regulations and dispose of in accordance with regulations.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

Any severe incident that occurs in connection with the product shall be reported to the manufacturer and the responsible national authority.